

# APE 1.5 DESINFECCION DE ALTO NIVEL (DAN)

Record ID

NOMBRE EVALUADOR

FECHA REALIZACIÓN DE PAUTA

FUNCIONARIO EVALUADO

## CRITERIO DE EVALUACIÓN

- |                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Elimina EPP que utilizaba durante el procedimiento.                                                                                                                                                                         | <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No |
| 2. Realiza lavado clínico de manos.                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No |
| 3. Se coloca EPP, correspondientes para el lavado del equipo.                                                                                                                                                                  | <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No |
| 4. Retira válvulas de aire-agua, succión y canal de trabajo. Las deposita en copela con detergente, las cepilla y enjuaga por separado.                                                                                        | <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No |
| 5. Sumergir equipo en contenedor con agua + detergente enzimático y comenzar lavado de la parte externa del equipo, desde la parte menos a la más contaminada.                                                                 | <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No |
| 6. Cepilla canal de aspiración hasta salir por extremo distal del equipo, luego ingresa por el mismo canal hasta salir por la conexión de aspiración. Repite proceso 2 veces. Siempre con el equipo sumergido en el contenedor | <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No |
| 7. Cepilla canal de trabajo saliendo por extremo del equipo. Repite cada proceso 2 veces. Siempre con el equipo sumergido en el contenedor.                                                                                    | <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No |
| 8. Cada introducción del cepillo largo se realiza unidireccionalmente                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No |
| 9. Cepilla con cepillo corto conducto aire-agua, inicio canal de trabajo y extremo distal del equipo.                                                                                                                          | <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No |
| 10. Enjuaga con abundante agua corriente para eliminar el detergente de la superficie y de los canales internos.                                                                                                               | <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No |
| 11. Seca equipo retirando exceso de agua desde la superficie y canales internos.                                                                                                                                               | <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No |

Cumplimiento de Pauta  
0=No cumple  
1= Cumple